




ResMed

AirMini™

DC/DC Converter 65W

User Guide

Dansk

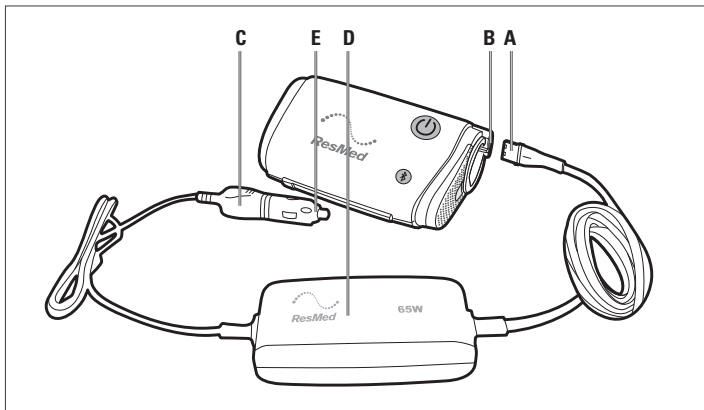

AirMini DC/DC Konverter 65 W gør det muligt for dig at anvende din maskine via en cigarettænderstikdåse (en 12 V eller 24 V DC strømkilde) i en bil, båd eller et andet køretøj, der er udstyret med et egnet batteri. AirMini DC/DC Konverter 65 W er udelukkende beregnet til brug med AirMini-maskinen.

Anvendelse af konverteren via en cigarettænderstikdåse

1. Placer konverteren på en plan overflade med ResMed logoet opad.
2. Sæt konverterens kontakt **(A)** i maskinens strømindgang/jævnstrømsstik **(B)**.
3. Sæt konverterens adaptorstik **(C)** i køretøjets cigarettænderstikdåse. Lampen **(D)** vil lyse grønt, når den starter op.
Hvis batteriniveauet er lavt, vil lampen lyse gult. Hvis batteriniveauet er for lavt til at drive maskinen, vil konverteren og lyset blive slukket.

Noter:

- I nogle køretøjer kræves det, at tændingsnøglen drejes til ACC-position, før der tilføres strøm til køretøjets cigarettænderstikdåse.
- Strømkablet kan ikke udskiftes.
- Hvis batteriet ELLER bilen, båden eller køretøjet ikke er i god stand, vil der måske ikke være batterikraft nok til at starte køretøjet igen efter anvendelsen.
- Når konverteren ikke anvendes, skal den kobles fra køretøjets cigarettænderstikdåse for at forhindre afladning af batteriet.
- AirMini DC/DC konverteren må kun anvendes med AirMini-maskinen for at sikre korrekt funktion.
- ResMed anbefaler tilslutning af et deep cycle-batteri til konverteren som strømkilde til maskinen, da deep cycle-batterier er optimeret til hyppig, kraftig afladning.
- Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at rapportere et uventet problem, bedes du kontakte en repræsentant fra ResMed, Teknisk Service hos ResMed eller se www.resmed.com.

Rengøring

Rengør om nødvendigt ydersiden af konverteren med en ren, fugtig klud.

Udskiftning af sikring

1. Skru sikringsfatningen løs **(E)** øverst på konverterens adapterstik **(C)**.
2. Fjern den gamle sikring, og sæt en ny sikring i af samme type og normering.
3. Skru sikringsfatningen i igen.

ADVARSLER



- Læs anvisningerne inden brug.
- Anvend kun konverteren, når den er tilsluttet en 12 V eller 24 V jævnstrømskilde.
- Forsøg ikke at ændre konverteren. Der er ingen dele i konverteren, der kan vedligeholdes af brugeren.
- Strømledningen må ikke tilsluttes en USB-port.
- Sørg for, at el-ledning og stik er i god stand, og at apparatet ikke er beskadiget.
- Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen dele af maskinen, herunder kabler, end den anbefalede afstand på 10 cm.
- Maskinen bør ikke anvendes ved siden af eller oven på/under andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende maskinen ved siden af eller oven på/under andet udstyr, bør det kontrolleres, at maskinen fungerer normalt i den opsætning, hvor den vil blive anvendt.

ADVARSLER


Konverteren er beregnet til brug på 12 V eller 24 V systemer med negativ jordforbindelse (hvor batteriets negative klemme er jordforbundet). Anvendelse på 12 V eller 24 V systemer med positiv jordforbindelse kan beskadige konverteren og køretøjets elektriske system. Hvis du er usikker på, om du har et negativt jordet system, se da bilens, bådens eller køretøjets manual.



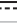

- Udskift sikringen med en sikring af samme type og normering for at undgå brandfare.
- Sørg for, at konverteren ikke er dækket, når den anvendes, for at undgå overophedning af konverteren.
- AirMini DC/DC Konverter er ikke beregnet til brug på fly.



Tekniske specifikationer




Længde (stik til stik)	3 m
Sikringskapacitet	12 A/250 V
Sikringstype	Slow blow, høj brydeevne
Indgang	12 V/24 V  8/4 A
Udgang	24 V  2,71 A
Driftstemperatur	+5 °C til +35 °C
Driftsfugtighed	10 til 95 % uden kondens
Driftshøjde	Op til 2.591 m over havet; lufttrykområde 1013 hPa (1013 cm H ₂ O) til 738 hPa (738 cm H ₂ O)
Temperatur under opbevaring og transport	-25 °C til +70 °C
Fugtighed under opbevaring og transport	5 til 95 % uden kondens
Konstruktionens levetid	5 år
Elektromagnetisk kompatibilitet	Produktet overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC60601-1-2 for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø. Bærbart RF-kommunikations-udstyr (herunder tilbehør såsom antennekabler og eksterne antenner) må ikke være tættere end 10 cm på nogen del af AirMini-systemet. Ellers kan udstyrets ydeevne svækkes. Oplysninger om elektromagnetiske emissioner og immunitet for denne ResMed enhed kan findes på www.resmed.com , på produktsiden under Service og Support.




De symboler, der kan være vist på maskinen

 Advarsel eller forsigtighedsregel, se medfølgende dokumentation;

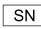 Klasse II-udstyr; **IP21** Beskyttet mod indsættelse af fingre og lodret dryppende vand; **IP22** Beskyttet mod indsættelse af fingre og bliver ikke usikker, når den udsættes for lodret dryppende vand, hvis enheden vippes op til 15 grader;  Jævnstrøm;  Sikring;  Producent;

 Europæisk Autoriseret Repræsentant;  Europæisk RoHS;

 Serienummer;  Kina forureningskontrol;  Fugtighedsgrænse;

 Temperaturgrænse;  Driftshøjde;  Atmosfærisk trykbegrænsning.



Miljøinformation

DC/DC konverteren skal bortskaffes separat, ikke som usorteret husholdningsaffald. Ved bortskaffelse af apparatet bør du benytte de godkendte indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingsssystemer, der er til rådighed i dit lokalområde. Anvendelse af disse indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingsystemer har til formål at reducere belastningen af de naturlige ressourcer og forhindre farlige stoffer i at skade miljøet. Hvis du har brug for oplysninger om disse affaldssystemer, bedes du kontakte de lokale affaldsmyndigheder. Symbolet med den overstregede skraldespand er en påmindelse om at benytte ovennævnte affaldsfaciliteter. Oplysninger om indsamling og bortskaffelse af ResMed-apparatet fås ved at kontakte ResMed-kontoret eller den lokale forhandler eller ved at slå op på webstedet www.resmed.com/environment.

Begrænset garanti

ResMed garanterer, at ResMeds DC/DC Konverter 65 W er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 1 år fra købsdatoen for den oprindelige køber. Denne garanti kan ikke overføres.

Hvis produktet svigter ved almindelig brug, vil ResMed efter eget skøn reparere eller udskifte det defekte produkt eller en eller flere af dets komponenter.

Denne begrænsede garanti dækker ikke: a) skade som følge af ukorrekt brug, misbrug, modifikation eller ændring af produktet; b) reparationer udført af en servicevirksomhed, der ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af ResMed til at udføre sådanne reparationer; c) skade eller forurening som følge af cigaret-, pipe-, cigar- eller anden røg; d) skade som følge af, at der er blevet spildt vand på eller ind i produktet.

Garantien gælder ikke for produkter, der sælges eller videresælges uden for det område, hvor de oprindeligt blev købt.

Garantikrav for defekte produkter skal indgives af den oprindelige kunde på købsstedet.

Denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier, inklusive enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Visse lande eller områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

ResMed er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader, som hævdes at være en følge af salg, installation eller brug af noget ResMed-produkt. Visse lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som kan variere fra land til land. Nærmere oplysning om rettigheder under garantien fås ved at kontakte den lokale ResMed-forhandler eller det lokale ResMed-kontor.



ResMed Ltd

MANUFACTURER

1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. AirMini is a trademark and/or registered trademark of the Resmed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip. ©2017 ResMed Ltd. 388125/1 2017-09

ResMed.com



388125